



# Cortador de Vello Quirúrgico 3M Clipper

- Clipper, de 3M, la manera más conveniente, versátil y segura de cortar el vello y eliminar el riesgo de infección en el sitio quirúrgico.

## CARACTERÍSTICAS

Universal, segura, su diseño es ergonómico y posee batería recargable de NiMH. Utiliza navajas desechable 9670 y conserva la integridad de la piel. Los Clipper 3M poseen dos cuchillas. La cuchilla inferior va en contacto con la piel y es fija. La segunda, superior es la que corta el pelo.

Es fácil de limpiar y es recargable.

## VENTAJAS

Su modelo universal sirve para remover vello del cuerpo y cabeza. Corta en dirección o en contra del crecimiento del vello y tiene capacidad para funcionar con o sin cable (sin necesidad de estar conectado a la corriente eléctrica). Es segura lo que permite una fácil colocación y remoción de la hoja de corte.

Es ergonómico y se adapta fácilmente a la mano, además posee estrías para evitar el deslizamiento.

Su batería con carga continua durante la operación en caso de ser usado con cable y provee 45 minutos de operación sin cable para una recarga de 12 horas.

Las navajas desechables disminuye el riesgo de contaminación cruzada y por lo tanto de una infección ya que no causa lesiones en la piel. Se limpia fácilmente utilizando solo un paño empapado con desinfectante. También puede lavarse bajo la llave de agua.

## BENEFICIOS

Versatilidad y adaptabilidad a todo tipo de paciente y vello a remover.

Brinda al profesional de la salud tranquilidad para la realización del proceso.

Impacta en costo-beneficio pues reduce los riesgos de contaminación cruzada y de transmisión de infecciones.




# Clipper de 3M: corta el riesgo, no al paciente.

- Investigaciones han mostrado que afeitarse la piel de los pacientes en la preparación preoperatoria, produce cortes y heridas microscópicas del sitio quirúrgico. Estas laceraciones y cortes permiten fácilmente que esas heridas provocadas se colonicen con microorganismos propios del paciente y de la flora exógena. Este daño no ocurre al cortar el pelo con clipper.

Como resultado usar el corte del pelo versus rasurar, determina una tasa más baja de infección del sitio quirúrgico (ISQ).

Hace más de 20 años que 3M inventó la tecnología "Clipper" (corte del pelo con máquina eléctrica y cuchillos desechables). Este invento fue lanzado a nivel mundial participando de esta manera y en forma efectiva en la prevención y control de las infecciones del sitio quirúrgico (ISQ). 3M se convierte en líder en la difusión de esta práctica basada en el conocimiento científico.

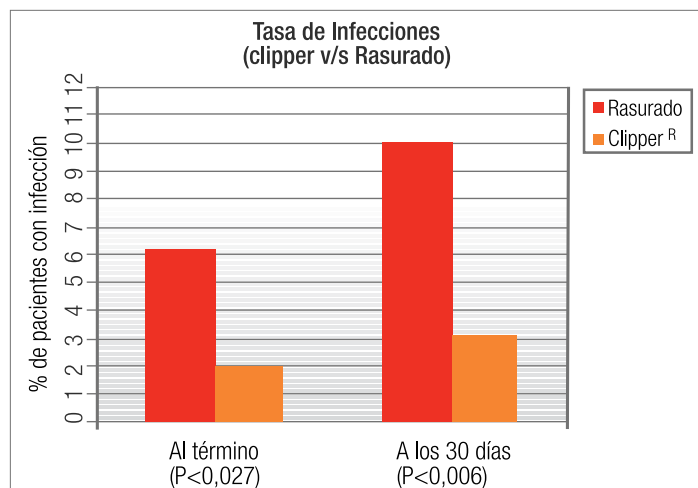

- Alexander y Cols. Encontraron que cortar el pelo con clipper reducía de manera significativamente la tasa de ISQ, con un p value inferior a 0.05. Otros autores con estudios prospectivos y de buena calidad han evidenciado similares resultados lo que convierte esta medida como Evidencia de tipo 1A.

Sellick y Cols. Encontró que usar clipper tiene menor riesgo en infecciones profundas comparando la preparación preoperatoria con clipper con preparación con rasurado.

La normativa MINSAL Chile y otras organizaciones a nivel mundial como AORN, APIC, CDC recomiendan que debe evitar rasurar a los pacientes porque hay suficiente evidencia que hacerlo aumenta el riesgo de infección en el sitio quirúrgico.

Código Producto	Descripción	Tamaño / Unidad	Unidad de Venta	Unidades de Productos
9677E	Cortador Quirúrgico de Vello Clipper®Eléctrico	Caja	1 Caja	1 Unidad
Código Producto	Descripción	Tamaño / Unidad	Unidad de Venta	Unidades de Productos
9670	Cuchillos Cortador de Vello Clipper®Eléctrico	Caja	1 Caja	50 Unidades